

Personal Injector

Brugsanvisning -
for den ny Avonex Prefilled
Sprøjte




UNION[®]
UM
MEDICO

Union Medico
Emdrupvej 22
DK 2100 København
Phone +45 70266010



1. Træk sprøjteholderen (slæden) tilbage, indtil du hører et klik.



2. Sæt den ny Avonex Prefilled Sprøjte i holderen. Lampen lyser sprøjten op, og det er derfor nemt at se, hvorvidt der er luft i sprøjten. Hvis der er luftbubbler i væsken, holdes sprøjten lodret. Bank let på sprøjten med din pegefinger, og boblerne vil flyde til toppen af sprøjten. Herefter presses stemplet forsigtigt ned, indtil en dråbe af væsken viser sig på nålens spids. Du kan fortsætte, når væsken er klar.

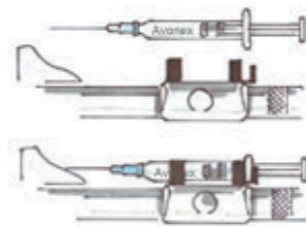

3. Vær sikker på at den ny Avonex Prefilled sprøjte sidder placeret imellem de to gribearme.

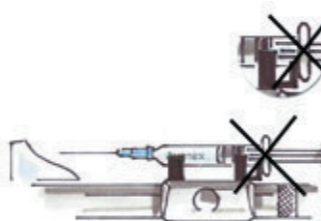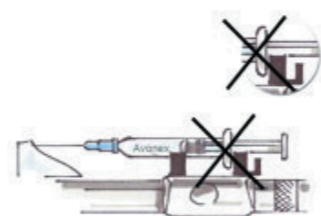


Vær opmærksom på at sprøjtes vinge ikke er placeret som illustreret ovenfor.

4. Rens huden på det sted, hvor du påtænker at foretage injektionen. Vi anbefaler, at du injicerer i den øverste del af låret.



5. Klargør din Personal Injector: Drej den nubrede sikkerhedslås med uret til position ON. Hold sikkerhedslåsen fast i denne position med et let fingertryk. (Din Personal Injector er nu aktiveret).

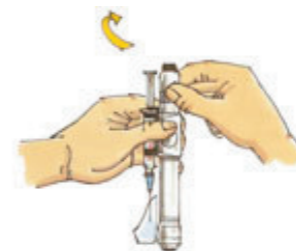


6. Lad Injectoren hvile blidt på injektionsstedet i en vinkel på 90°, indtil lampen lyser. Du må ikke bruge begge hænder på dette stadie af proceduren, da det kan forhindre sprøjteholderen i at bevæge sig frem ved injektionen.




7. Sæt din pegefinger på knappen øverst på Injectoren. Samme hånds lange- og tommelfinger holder den nubrede sikkerhedslås fast i ON-position. Nålen trænger gennem huden, når du trykker på knappen øverst på Injectoren.




8. Lampen oplyser sprøjten, og du kan derfor let se om der er blod i sprøjten. Injectoren holdes med den ene hånd mens du forsigtigt trækker stemplet tilbage med den anden for at kontrollere, om der er blod i sprøjten.

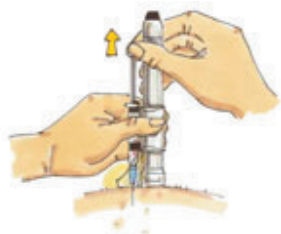

9. Fortsæt med injektionen med mindre der er blod i sprøjten. For at frigøre medicinen i kroppen trykkes stemplet langsomt ned.

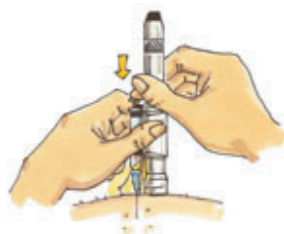

10. Injectoren holdes fast med den ene hånd, mens du trækker sprøjteholderen tilbage med den anden indtil du hører et klik. *Vær sikker på at du ikke slipper sprøjteholderen før du hører klikket, da du ellers vil blive givet endnu en injektion.*

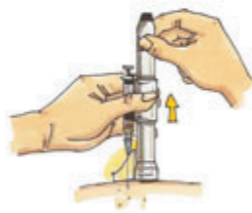

11. Fjern Injectoren fra kroppen. Tag derefter sprøjten ud af gribearmene på slæden.



12. Frigør sikkerhedslåsen på Injectoren og tryk på knappen øverst på injektoren så skyderen igen kan glide frem til startposition. Læg din Personal Injector tilbage i etuiet.



13. **Vedligeholdelse af din Personal Injector.** Du må aldrig bruge sprit eller stærke opløsningsmidler til rengøring af din Personal Injector. Brug en mild sæbeopløsning og aftør instrumentet med en blød fugtig klud. **Udskiftning af batteri.** Hvis lyset bliver svagt, er det på tide at udskifte batteriet.



14. *Det er meget vigtigt at sikre, at den lille runde kontakt samt den lille fjeder er på plads, inden det nye batteri sættes i. Kontakten skal sidde i det lille hul og fjederen rundt om den.* Begge er placeret bag batteriet. Skru enddelen af din Personal Injector af. Tag det brugte batteri ud. Udskift det med et nyt 3-Volts lithium batteri. Sørg for at +-siden vender opad mod Injectorens endedel. Enddelen af Personal Injector skrues på igen.