

Personal Injector

Notice à utiliser -
uniquement pour la nouvelle
Avonex Prefilled Syringe




UNION[®]
UM
MEDICO

Union Medico
Emdrupvej 22
DK 2100 Copenhagen
Phone +45 70266010



1. Ramenez le porte-seringue (coulisse) en arrière jusqu'à ce que vous entendiez un 'clac'.



2. Placez la nouvelle Avonex Prefilled Seringue dans le porte-seringue. La lampe éclaira la seringue, permettant d'y déceler facilement la présence d'air. Si des bulles d'air apparaissent dans la solution liquide, la seringue doit être tenue à la verticale. Tapotez légèrement avec votre index pour faire monter les bulles d'air à la surface de la seringue. Appuyez précautionneusement sur le piston jusqu'à ce qu'une goutte de liquide apparaisse au bout de l'aiguille. Vous pouvez procéder à l'injection lorsque le liquide est limpide.

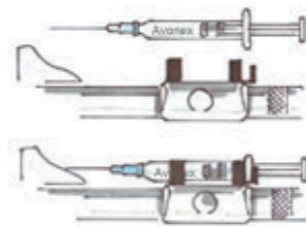

3. Assurez-vous que la nouvelle Avonex Prefilled seringue est bien en place dans les mâchoires.

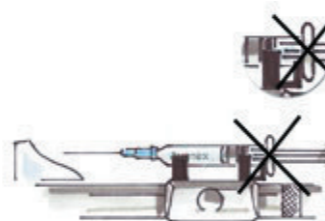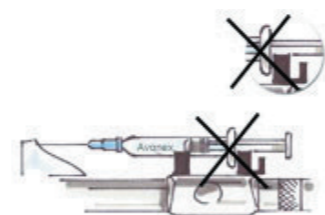


Vérifiez que l'ailette de la seringue n'est pas placée comme montré ci-dessus.

4. Nettoyez la peau à l'endroit prévu pour l'injection. *Nous vous recommandons de pratiquer l'injection à la partie supérieure de la cuisse.*



5. Préparez le Personal Injector: Tournez la bague de sécurité nervurée dans le sens horaire pour la mettre en position ON. Maintenez la bague de sécurité dans cette position par une légère pression du doigt (le Personal Injector est maintenant activé).

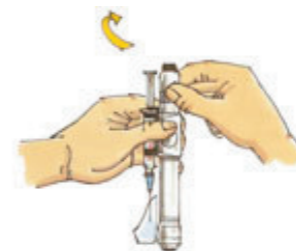


6. Maintenez doucement le Personal Injector à l'endroit choisi pour l'injection, perpendiculairement à la peau, jusqu'à ce que la lampe s'allume. *N'utilisez pas les deux mains à ce stade de la procédure car cela pourrait empêcher le déplacement vers l'avant du porte-seringue (coulisse) lors de l'injection.*




7. Posez l'index sur le bouton situé en haut du Personal Injector. Le majeur et le pouce de la même main continuent à maintenir la bague de sécurité nervurée en position ON. La pression sur le bouton situé au sommet du Personal Injector fait pénétrer l'aiguille dans la peau.



8. La lampe éclaire la seringue, permettant d'y déceler facilement la présence de sang. Maintenez fermement le porte-seringue d'une main tout en tirant doucement sur le piston de la seringue de l'autre pour vérifier l'absence de sang.

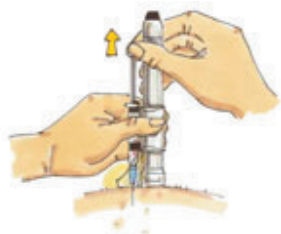

9. Poursuivez l'injection s'il n'y a pas de sang dans la seringue. Pour injecter le médicament, enfoncez lentement le piston.

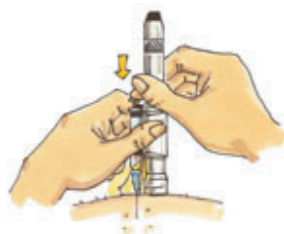

10. Maintenez le Personal Injector d'une main tout en ramenant le porte-seringue (coulisse) en arrière de l'autre main, jusqu'à ce que vous entendiez un 'clic'.
Veillez à ne pas relâcher le porte-seringue avant d'avoir entendu le 'clic', sinon vous recevrez une nouvelle injection.



11. Retirez le Personal Injector. Dégagez ensuite la seringue des mâchoires coulissantes.



12. Lâchez la bague de sécurité du Personal Injector et appuyez sur le bouton situé au sommet pour permettre à la coulisse de revenir dans sa position initiale. Remettez le Personal Injector dans sa boîte.



13. **Entretien du Personal Injector**
N'utilisez jamais d'alcools méthylés ou de solvants forts pour nettoyer le Personal Injector. Utilisez un savon liquide doux et humectez-en un tissu pour nettoyer l'appareil.
Remplacement de la pile
Si la lumière faiblit, il est temps de remplacer la pile.



14. *Il faut absolument vérifier que le loquet de contact métallique rond et le petit ressort sont bien en place avant d'insérer la nouvelle pile. Le loquet de contact doit se trouver dans la petite cavité et le ressort doit l'entourer. Tous deux sont situés en arrière de la pile.*
Dévissez l'extrémité du Personal Injector. Retirez la pile usagée. Remplacez-la par une nouvelle pile au lithium de 3 Volts. Vérifiez que la face positive (+) se trouve au-dessus, dirigée vers l'extrémité du Personal Injector. Revissez l'extrémité de l'appareil.